



Druppelbril voor toedienen van oogdruppels

€ 14,95



Met deze handige kunststof druppelbril van Druppelzorg kunt u moeiteloos zelf uw ogen druppelen, zonder hulp. De bril is zo ontworpen dat bijna alle gangbare maten flesjes en pompjes erin passen en stevig vastzitten.

Kies gewoon de juiste opening voor uw flesje. Het is een ideale oplossing voor het gemakkelijk toedienen van oogdruppels.

Belangrijk: Let op dat de bril niet geschikt is voor flesjes (Minims) met een lange pipet, omdat de lange hals in contact kan komen met uw oog. Ook is de bril niet geschikt voor oogfels.

Gebruiksaanwijzing:

1. Was uw handen.
2. Plaats het doseerflesje of -flacon stevig in de passende opening van de druppelbril.
3. Zet de druppelbril op.
4. Kantel uw hoofd achterover, zodat het flesje boven uw oog staat.
5. Houd uw oog open met één hand en doseer druppels door in het flesje te knijpen met de andere hand.
6. Spoel de oogdruppel bril na gebruik af met water, alcohol of een desinfecterend middel en droog deze met een schone doek.

<https://www.hulpmiddelenshop.nl/druppelbril-voor-oogdruppels>